

介護保険について
介護保険レンタル対象品
特殊寝台・特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
車いす・車いす付属品
スロープ
移動用リフト
手すり
歩行補助つえ
歩行器
自動排泄処理装置
徘徊感知機器
介護保険購入対象品
腰掛便座
入浴補助用具
簡易浴槽
リフト吊り具
住宅改修について
給付一覧表

介護保険について
介護保険レンタル対象品
特殊寝台・特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
車いす・車いす付属品
スロープ
移動用リフト
手すり
歩行補助つえ
歩行器
自動排泄処理装置
徘徊感知機器
介護保険購入対象品
腰掛便座
入浴補助用具
簡易浴槽
リフト吊り具
住宅改修について
給付一覧表

床ずれ防止用具


福祉用具貸与
コード 17-1005
介護予防福祉用具貸与
コード 67-1005

◆ピュアレックス

株式会社 **モルテン**




マットレスの構造図

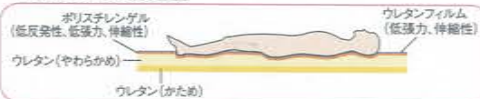

ゲルとウレタンの複合素材により、優れた伸縮性とフィットリング性を実現し、体にかかる圧を低減します。カバーは汗や水分を素早く吸収拡散し、いつもサラサラで快適です。

直接置くタイプ 83cm幅
静止型 ムレ防止 90・91cm幅
寸法図(単位:cm) 重量:10.0(11.0)kg

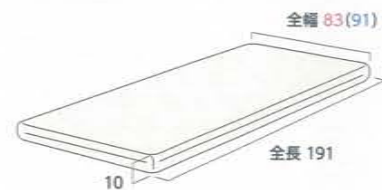


■品番:MPXV1083SP / MPXV1091SP

ご利用者負担額	1期 514円/月	レンタル料金
	2期 1,028円/月	5,140円/月

◆メディマット




防水と透湿のメカニズム

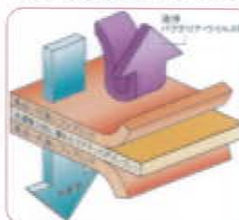

特殊低反発ウレタンで優れた体圧分散と冬は暖かい保温が得られます。医療素材カバーは、防水・透湿性でムレずに夏は快適な寝心地です。

マットレスの上に置くタイプ 83cm幅
静止型 ムレ防止 90・91cm幅
寸法図(単位:cm) 重量:4.4(5.5)kg

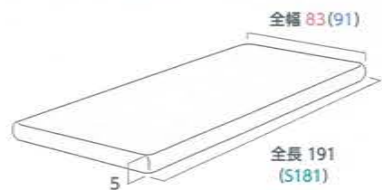

■品番:BF835 / BF915



ご利用者負担額	1期 616円/月	レンタル料金
	2期 1,232円/月	6,160円/月

◆アドバン

株式会社 **モルテン**



圧切替型 除湿効果 直接置くタイプ 83cm幅
厚さ16cm 1日あたりの電気代 約2.8円 90・91cm幅
重量:5.2(5.6)kg ショートサイズ有

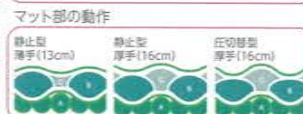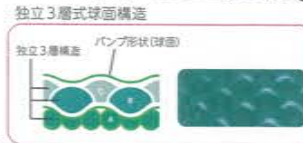


■品番:MADV83A / MADV91A

独立3層式パン(球面)構造により、安定感と優れた体圧分散性を両立。体重設定が不要で、圧切替型と静止型の動作切替が可能です。除湿機能付。

ご利用者負担額	1期 822円/月	レンタル料金
	2期 1,644円/月	8,220円/月

◆アルファプラ ソラ

株式会社 **タイカ**

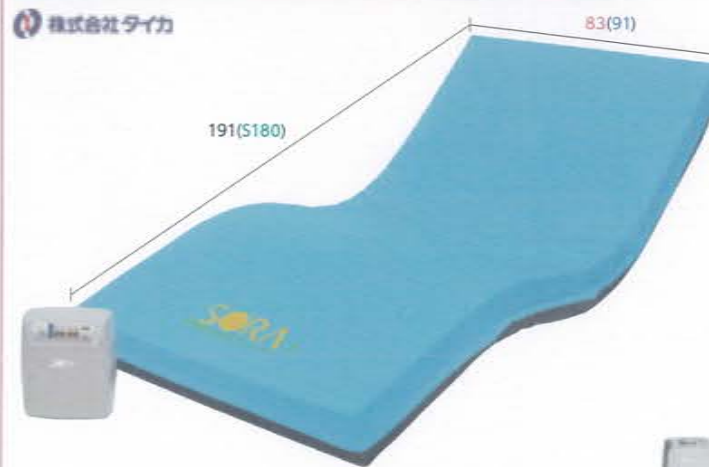

圧切替型 直接置くタイプ 83cm幅
厚さ13cm 1日あたりの電気代 約3.3円 90・91cm幅
重量:6.3(6.8)kg ショートサイズ有

【トップフォーム】しっとり柔らかい感触でエアセルの重なりを減らし、通気性を高めます。
【レッグフォーム】波型加工でかかとをやさしくつみこみます。
【サイドフレーム】高硬度ウレタンで膝や手をついての介助がしやすくなっています。

54個のエアセルが膨らみ収納




■品番:NK-T83 / NK-T91

ご利用者負担額	1期 822円/月	レンタル料金
	2期 1,644円/月	8,220円/月



安定性と柔らかさを持つ静止型ウレタンマットレスをベースにし、腰部にエアセルを搭載。両方の利点を兼ね備えたハイブリッドタイプです。

◆ステージア

株式会社 **モルテン**

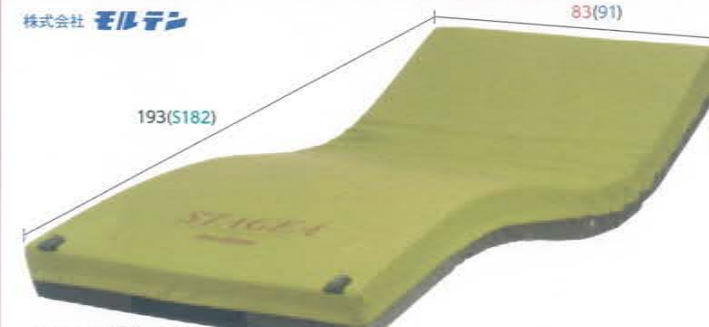

圧切替型 除湿効果 冷え対策 直接置くタイプ 83cm幅
厚さ13cm 1日あたりの電気代 約5.3円 90・91cm幅
重量:10.0(11.0)kg ショートサイズ有

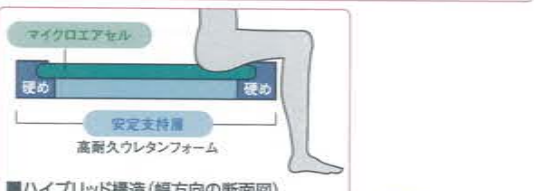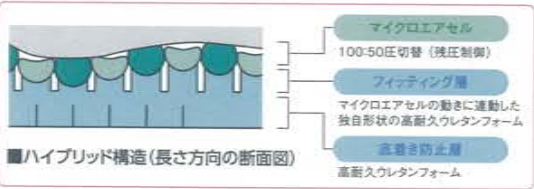

■品番:MSTA83 / MSTA91

ご利用者負担額	1期 720円/月	レンタル料金
	2期 1,440円/月	7,200円/月

冷え対策とムレ対策ができる圧切替型のハイブリッドエアマットです。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

自動排泄
処理装置

徘徊
感知機器

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

給付
一覧表

介護保険
について

介護保険
レンタル
対象品

特殊寝台・
特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位
変換器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

自動排泄
処理装置

徘徊
感知機器

介護保険
購入
対象品

腰掛便座

入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具

住宅改修
について

給付
一覧表



床ずれ防止用具

福祉用具貸与
コード
17-1005

介護予防福祉用具貸与
コード
67-1005

[単位: cm]

◆ネクサス



圧切替型 除湿効果 直接置くタイプ 83cm幅 90-91cm幅 ショートサイズ有 厚さ13cm 重量:7.5(8.1)kg

1日あたりの電気代 約2.4円

デュアルフィットセル



2つのバネセル 体圧分散力 スリ・摩擦軽減

二層式エアセル 深部の体圧 保持力・安定感

ベースマット 安全対策

- 1 リハビリモード
約3分で全てのエアセルの内圧を高めて静止した状態になるので、安定した座面が確保でき自立やリハビリ運動を支援します。
- 2 微波動モード
(ネクサスオリジナル機能)
- 3 ムシを軽減するための換気モード




デュアルフィットセルで、予防から重度まで幅広い療養者や状態の変化に対応する高機能マルチエアマットです。リハビリモード付。

■品番:CR-600 / CR-610

ご利用者負担額	1期	720円/月	レンタル料金	7,200円/月
	2期	1,440円/月		

■ここちあ結起 3D

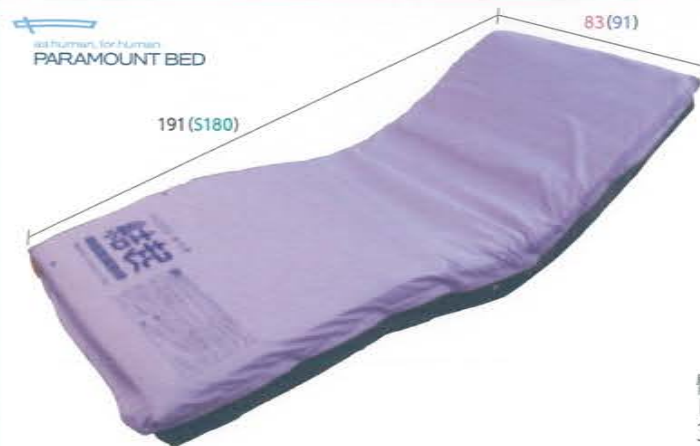


圧切替型 除湿効果 直接置くタイプ 83cm幅 90-91cm幅 ショートサイズ有 厚さ15cm 重量:10.9(11.4)kg

1日あたりの電気代 約2.5円

ガイドランス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル

臀部から大腿部をしっかりと支える3Dセル

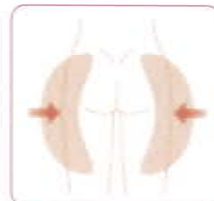

マットレスのずり落ちを防ぐE-ストレッチ



貼りついた背中を浮かせる背ぬき



■品番:KE-933QS / KE-931QS

楽匠Z、楽匠Sと一緒に使用することで、ベッドの背あげ操作に連動してエアの圧力を自動調整します。【ベッドリンク機能】

ご利用者負担額	1期	864円/月	レンタル料金	8,640円/月
	2期	1,728円/月		

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

●ビッグセル∞(インフィニティ)



圧切替型 除湿効果 直接置くタイプ 83cm幅 90-91cm幅 ショートサイズ有 厚さ17cm 重量:8.3(8.6)kg

1日あたりの電気代 約2.4円

- 1 拘縮対応モード
- 2 微波動モード
- 3 クイックハードモード



背上げ自動内圧コントロール




屈曲拘縮や病的骨突出などがある利用者に対して高い体圧分散性能を発揮します。背あげ時の自動圧力調整や換気モードによるムシ対策により、より安楽で快適に過ごせる高機能エアマットです。

■品番:CR-550 / CR-555

ご利用者負担額	1期	1,028円/月	レンタル料金	10,280円/月
	2期	2,056円/月		

●グランデ

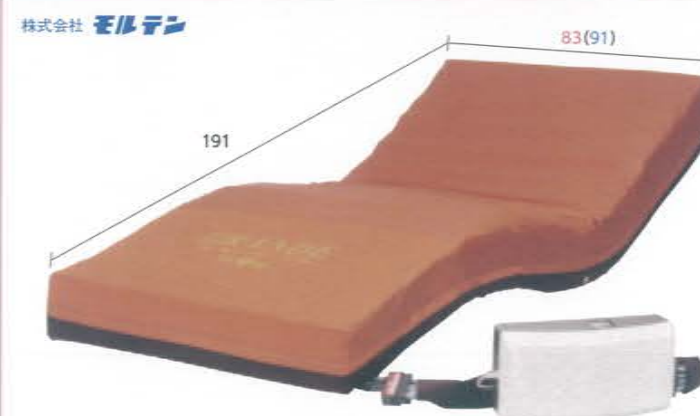

圧切替型 除湿効果 直接置くタイプ 83cm幅 90-91cm幅 ショートサイズ有 厚さ13-18cm 重量:6.0(6.2)kg

1日あたりの電気代 約3.5円

ダブル圧切替方式



1 アセスメント&フィッティングモード



2 アシスト機能



3 マニュアルモード



①寝返り ②体型 ③足の変形 ④むくみ ⑤痛み ⑥床ずれ ⑦発汗の7項目を入力することで、ご利用者に最適な条件設定ができ、安全・安心な環境を提供します。

■品番:MGRA83 / MGRA91

ご利用者負担額	1期	1,028円/月	レンタル料金	10,280円/月
	2期	2,056円/月		

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。

床ずれ防止用具


福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与
 コード 17-1005
 コード 67-1005

オスカー

株式会社 モルテン



【単位: cm】
 直接置くタイプ 83cm幅
 90-91cm幅
 ショートサイズ有
 厚さ17cm
 重量:12.0(13.5)kg
 1日あたりの電気代 約5.5円

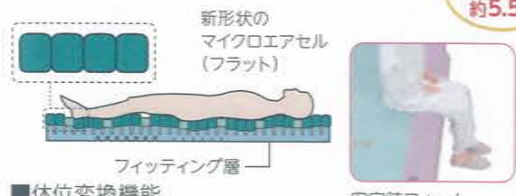

■マニュアルモード

■ 上向	■ おまかせ	■ おまかせ	■ おまかせ	■ おまかせ
■ 右上→左上	■ はやい	■ みつう	■ ハード	■ 圧切替型安定重視
■ 左上→右上	■ はやい	■ みつう	■ みつう	■ 圧切替型除圧重視
■ 上向→上向	■ ひざ上	■ ひざ上	■ ソフト	■ 圧切替型除圧重視
■ 右上→上向	■ ひざ上	■ おそい	■ 超ソフト	■ 静止型
■ 左上→上向	■ ひざ上	■ ひくい	■ マットかたさ	■ マット除圧動作
■ 自動体位交換動作	■ 指定体位交換体位	■ 自動体位交換所要時間	■ 自動体位交換角度	■ マット除圧動作

4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する自動体位交換機能や体位保持機能付エアマットです。生活動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も可能です。

■品番:MOSC83 / MOSC91

ご利用者負担額	1期 822円/月	レンタル料金	8,220円/月
	2期 1,644円/月		

クレイド

株式会社 モルテン



直接置くタイプ 83cm幅
 90-91cm幅
 厚さ16cm (体位変換時最大33cm)
 重量:7.5(7.9)kg
 1日あたりの電気代 約6円



■品番:MCRD83A / MCRD91A

ご利用者負担額	1期 1,234円/月	レンタル料金	12,340円/月
	2期 2,468円/月		

アドバン(P27)の機能に自動体位交換機能・体位保持機能を追加した、高機能多目的エアマットです。変換時に膨縮サイドセルが膨らみ、ずれ落ちを防ぎます。

エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

短時間(3時間程度)の停電、電源OFF状態の場合であれば問題なく使用できますが、マット内の空気は少しずつ抜けていきます。停電、電源OFF状態が長時間(3時間を超える)になる可能性がある場合は、下記の対応を実施することで、エアの抜けを防ぐことができます。

機種	短時間の停電 (3時間程度)	長時間の停電 (3時間を超える場合)	復旧後の設定
ケープ	特別な操作の必要はなくそのままご使用になれます。	用意するもの ビニールひも、太い輪ゴムなど ①送風チューブの途中をつぶれるまで折り曲げる ※ポンプから送風チューブを外さないで行ってください。 ②ひもなどで折り曲げ付近をしっかり留める ※結束部より空気の出がないが確認してください。 電力が復旧するまで2時間置きに体位変換をお願いします。	初期設定に戻ります。送風チューブのテープや、輪ゴム、紐など外し、電源確認後体重設定と各種モード設定などを再設定して下さい。約20分程度でエアマットのエアが充填され、通常にご利用いただけます。
ビッグセル [∞]		底づきの心配はありません 停電と同時に特殊なバルブ(電磁弁)がエアセル内の空気漏れを自動で遮断するため、マット全体の内圧を約2週間保持できます。それ以降も、ベース部の立体通気繊維がベッドへの底づきを防止します。	メモリ機能付きでコンセントの抜き差しを行った場合でも、直前の設定が表示されますので再設定の必要はありません。 ※クイックハードモード、手動ヘッドアップモード、エコモードは除きます。
ステージア		底づきの心配はありません 空気が抜けにくい構造になっているだけでなく、仮にエア層の空気が抜けても、ウレタン層が底づきを防止するため、停電時間の長さに関わらず特別な対策は不要です。(停電時でも最高の安全性が保てるエアマットレスです。)	
オスカー			
グランデ		底づきの心配はありません マット最下部の底づき防止層は、より空気が抜けにくい構造になっているため、底づきの心配はありません。(停電時でも通常の使用方法で約2週間は底づきしない状態を維持します)	各種設定項目は、停電前、電源OFF前(元の入力条件)に戻りますので、再設定の必要はありません。送風チューブのテープや、輪ゴム、紐などを外し、電源の確認を行ってください。
アドバン	底づきの心配はありません 空気が抜けにくい構造になっていますので、短時間停電であれば、正常に使用できます。若干空気は抜けますが、特別な対策は不要です。	空気を抜くため、以下の対策を実施してください マット内の空気抜けをさらに抑えることができます。 ①エアホースを折り曲げて、ガムテープなどで固定してください。 ※停電復旧後は必ず、エアホースを元の状態に戻してください。	
クレイド		予め停電実施が分かっている場合は、以下の対策も実施してください。 ②設定を「厚手」や「静止型」モードに変更してください。	
アルファプラソラ		1週間程度抜けない構造にて特別な対策は必要ありません。 仮に空気が全て抜けてしまっても、ウレタンフォームによって底づきしにくい構造になっております。	自動で停電前使用のモードで作動。
タイカ			
パルママット		特別な操作をすることなく、空気の漏れを防ぐことができます。 エアマットレスへの通電がなくなると、自動的にポンプ内の全ての弁を閉め、空気の漏れを防ぎます。体重60kgの方が寝ている場合、約2週間空気を保持することができます。	前の設定を保持しておりますので、改めて設定を行う必要はありません。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。

介護保険について

介護保険レンタル対象品

特殊寝台・特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行補助つえ

歩行器

自動排泄処理装置

徘徊感知機器

介護保険購入対象品

腰掛便座

入浴補助用具

簡易浴槽

リフト吊り具

住宅改修について

給付一覧表

介護保険について

介護保険レンタル対象品

特殊寝台・特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

車いす・車いす付属品

スロープ

移動用リフト

手すり

歩行補助つえ

歩行器

自動排泄処理装置

徘徊感知機器

介護保険購入対象品

腰掛便座

入浴補助用具

簡易浴槽

リフト吊り具

住宅改修について

給付一覧表